


## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA COLETA E LEITURA KETO VET CABRA

- 1- VERIFICAR QUE O APARELHO KETO VET ESTEJA COM A PILHA E DESLIGADO.
  - O aparelho trabalha desligado, ele liga automaticamente no momento que a fita é acoplada.
- 2- ANTES DE COMERÇAR OS TESTES COM AS FITAS, ACOPLAR O CHIP CALIBRADOR.
  - É importante calibrar o aparelho sempre ao primeiro uso e sempre quando chegar um lote novo de fitas.
    - ◆ Colocar o CHIP Calibrador com o aparelho desligado;
    - ◆ Esperar o “OK”
    - ◆ Retirar o CHIP
    - ◆ Não guardar o CHIP dentro do frasco de fitas (guarde no estojo)

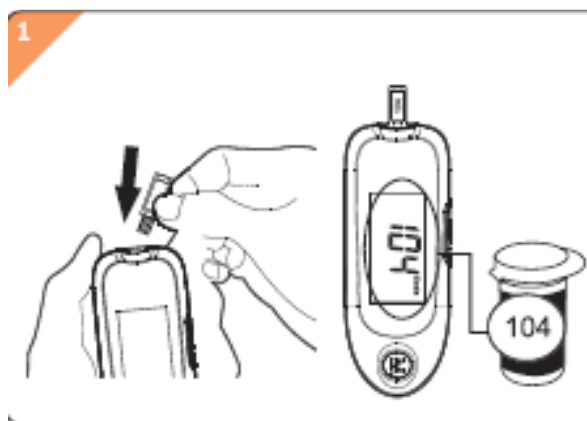

Acoplar a CHIP calibrador no aparelho com ele desligado.

## EXTRAÇÃO DE SANGUE: PONTA DE ORELHA UTILIZANDO UM AGULHA 40X12

TRABALHAR COM UMA GOTA ESPESSA E DE BOM VOLUME




Punção de gota de sangue na orelha

### 3- INICIAR OS TESTES COM AS FITAS

- Sempre com o aparelho desligado. Inserir uma fita na abertura, que ele irá ligar automaticamente.
  - ◆ Abrir o frasco de tiras – Trabalhar com mãos limpas e seca para manipular as fitas;
  - ◆ Inserir a fita no aparelho – Parte azul para cima;
  - ◆ Acoplar até que o aparelho ligue automaticamente;
  - ◆ Esperar os processos aparecerem no visor (CHK > Temperatura > Código > piscar o sinal da gota de sangue)
  - ◆ Quando o sinal da gota piscar – ESSE É O MOMENTO DE ENCOSTAR A PONTA DA FITA NA GOTA DE SANGUE.
  - ◆ Resultado - depois do cronômetro (5 segundos). Expresso em mmol/L.

Considerações importantes:

- ❖ Trabalhar com as mãos limpas e secas para manipular as fitas.
- ❖ A tira trabalha por capilaridade, ou seja, na extremidade que irá o sangue, deve trabalhar com o volume correto até preencher o canal por completo. Não deixar escorrer excesso de sangue na fita.

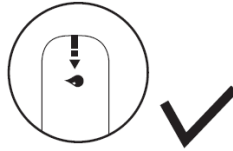

- ❖ Tomar cuidado para não deixar o sangue coagular antes de encostar na fita.
- ❖ Trabalhar com uma gota de sangue espessa e de bom volume, livre de sujidades.

Retirar a fita após anotação em planilha do resultado e descartá-la em local apropriado.

Suporte:

BRUNO

31 99885-6258

31 3653-2025